

排卵日検査薬 LH



排卵日をチェック

わかりやすい!!

判定部のラインの本数が増えることで
排卵日がわかります。

確実な判定を
手助けする
1日1回7日分

新しい“3段階検出法”

LHの増加を3段階で検出し、より広範囲に
排卵日の予測が可能です。



スコア1
(判定ライン1本)



スコア2
(判定ライン2本)



スコア3
(判定ライン3本)



排卵日 (最も妊娠しやすい時期) が
約1日前に分かります




¥ 1000
3500 17
10500
2 19

LHとは



妊娠するためには、自分の排卵日を正確に知ることがとても重要です。排卵日の前後が最も妊娠しやすい時期ですから、夫婦生活のタイミングを排卵日に合わせていただくのが、妊娠への第一歩となります。排卵前にはLH(黄体形成ホルモン)というホルモンが下垂体から放出されます。このホルモンの放出は決して緩やかなものではなく、急激に上昇し、一気にピークに達します。これをLHサージと呼びます。LHサージが起こってから36時間以内に排卵が起こると予測されます。

P-チェック・LH は尿に排出されたこのLHを検出する試薬で、排卵日を事前に予想することができます。

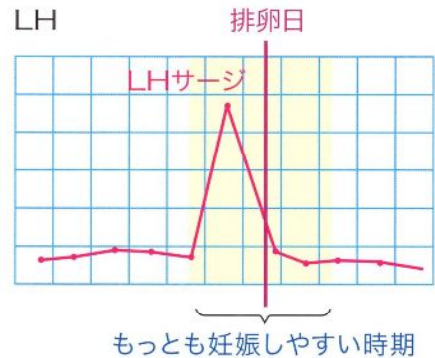

検査のしかた

わかりやすく
なりました!

判定部のラインの本数(スコア値)が増えることで排卵日がわかります。前日より判定部のラインの本数が増加したら、36時間以内に排卵が起こると予測されます。

3段階検出法

判定部に現れる3本のラインによって、低域から高域まで幅広くLH(黄体形成ホルモン)の増加が検出できます。より広範囲に排卵日の予測が可能となりました。

1 採尿

採尿部
キャップをはずし尿をかける(5秒以上)

2 10分待つ

キャップ 判定窓
キャップをかぶせ水平なところに置く

3 判定

スコア値 (判定ライン本数)	スコア0 (判定ライン0本)	スコア1 (判定ライン1本)	スコア2 (判定ライン2本)	スコア3 (判定ライン3本)
リファレンス部				
判定部				

検査日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目
結果						
判定ライン本数	0本	0本	0本	2本	1本	0本

検査開始日から4日目に判定部のラインの本数(スコア値)が増加しました。このラインの確認後、36時間以内に排卵が起こると予測されます。この期間は最も妊娠しやすい期間と考えられます。

※説明書をよく読んでからご使用ください。 ※避妊の目的では使用できません。

キット内容

P-チェック・LH 7回用
(テストスティック7本)
商品サイズ・重量 190×77×40mm・110g

商品コード63421
希望小売価格
3,500円
(税込み3,675円)



キット内容

成分 ・マウスモノクローナル抗LH抗体結合金コロイド
・ハプテン結合マウスモノクローナル抗LH抗体
(3種のハプテンの混合物)

使用目的 尿中の黄体形成ホルモン(LH)の検出

最小検出感度 スコア1を示す最小濃度は、10mIU/mLである。

貯蔵方法 室温(1~30℃)

有効期間 20ヶ月

製造販売元 株式会社 ミズホメディー
MIZUHO MEDY Co., Ltd.

本社 / 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4
営業企画部 / TEL 0942-84-5494 FAX 0942-84-5490
東京営業所 / TEL 03-3861-7447 FAX 03-3861-7448
大阪営業所 / TEL 06-6458-5711 FAX 06-6458-5648